

Technisches Datenblatt

Primus Kids

| | |
|---|--|
| Best.-Nr.: | 711 110 |
| Produkt-Bezeichnung: | EKASTU Einmal-Notfallbeatmungshilfe für Laienhelfer Primus Kids |
| Angewandte Norm: | DIN 13154 |
| Verwendung: | Zur einmaligen Verwendung bei einer Notfall-Beatmung bei Kindern zwischen 3 und 12 Jahren, als Erste-Hilfe-Maßnahme durch Laienhelfer. Primus Kids schafft eine Barriere die den unmittelbaren Kontakt zu den Atemwegen (Mund-zu-Mund und/oder Mund-zu-Nase) vermeidet. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt. |
| Beschreibung: | Die Einmal-Notfallbeatmungshilfe für Laienhelfer Primus Kids ist speziell für die Anwendung an Kindern zwischen 3 und 12 Jahren entwickelt. Sowohl die Produktgestaltung als auch die Anwenderhinweise sind explizit auf diese Zielgruppe ausgelegt. Das Produkt besteht aus diversen Materialien und Materialschichten. Der Durchlass des filtrierenden Teils erfüllt, in beide Richtungen, bei einem konstanten Volumenstrom von 20 l/min, die Anforderungen von FFP3 nach EN 149:2001+A1:2009. |
| Materialien: | Filtrierender Teil: Mikroglasfaser / Melt Blown (FFP3) (Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C) Trägermaterial: transparente Kunststoffolie (PP) (Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C) Fixierungsschlaufen: transparente Kunststoffolie (PP) (Ohren) (Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C) |
| Filtrierender Teil: (Freie Fläche) | mindestens 33,5 cm ² |
| Arbeitsprinzip: | Partikel werden durch das Mikroglasfaser / Melt Blown – Filter (FFP3) filtriert |
| Gewicht: | ca. 7 g |
| Durchlassgrad/Filtermedium: (maximal im Anlieferungszustand) | Test Aerosole: Natriumchlorid: 0,02% (Prüfvolumenstrom: 20 l/min) (DIN 13154) Paraffinöl: 0,04% (Prüfvolumenstrom: 20 l/min) (DIN 13154) |
| Atemwiderstand: (maximal im Anlieferungszustand) | bei 20 l/min Prüfvolumenstrom, 250 Pa (DIN 13154) |
| Kennzeichnung: | Produkt-Bezeichnung Hersteller-/Adresse Schweizer Repräsentant Markenzeichen des Herstellers (LOGO) CE-Kennzeichnung Gültige Norm Medizinprodukt Bestell-Nummer Informationsbroschüre des Herstellers beachten LOT-Nr. und PZN Piktogramme zu Lagerbedingungen und Anwendung |
| Handhabung: | Einmal-Notfallbeatmungshilfe erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung entnehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers verwenden |
| Bereithaltung: | Vor unnötiger Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen beachten |
| Warnhinweis: | Informationsbroschüre des Herstellers beachten! |
| Verwenderhinweise: | Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig. |

TD 711110 01-04.23